



# KiiltoPro MD Instru Des 45+

Ytdesinfektion



KiiltoPro MD Instru Des 45+ är en medicinteknisk produkt för professionell användning inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Produkten består av 45 vol% isopropyl alcohol, tensid (tar bort smuts) samt korrosionsskydd (rostskydd).

KiiltoPro InstruDes 45+ är effektiv mot bakterier, jästsvamp och höljeförsedda virus som t.ex. HIV, Hepatit B och C samt Coronavirus.

**Användningsområde** Bruksfärdig IPA-baserad instrumentdesinfektion (45 vol%) för non-invasiv medicinteknisk utrustning och instrumentblötläggning. För invasiva instrument enbart som för-desinfektion innan steriliseringprocessen. Används på ytor som tål alkohol. För professionell användning.

Medicinteknisk produkt, För professionell användning.

**Produktegenskaper** CE-märkt medicinteknisk produkt (MDR 2017/745), klass IIa, NB 0537.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) - 1 min

EN13624 (jästicidal effekt) 2 min

EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) - 1 min

EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek

EN14348 (Mycobactericidal effect): 5 min

Instrument blötläggning:

EN14561 (bactericidal effekt instrument) - 15 min

EN14562 (jästicidal effekt instrument) - 15 min

EN14563 (tuberculocid effekt instrument) - 15 min

EN17111 (höljeförsedda virus effekt instrument) - 15 min

**Bruksanvisning**

Används på ytor som tål alkohol. Om du är osäker på om ytan tål alkohol, prova först på ett undanskymt ställe. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först. Innehåller inte castor oil.

Desinfektion av non-invasiv medicinteknisk utrustning:

1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska.
2. Bearbeta ytan upprepade gånger så den är fuktig under hela kontakttiden (se etiketten samt ovan för kontakttider)
3. Lämna ytan att lufttorka

Desinfektion av instrument:

1. Skölj av organiskt material från instrumenten i vanligt kranvatten
2. Häll upp MD Instru Des 45+ i ett rent kärl
3. Lägg ner instrumenten och låt dem ligga i minst 15 min

**Obs**

Ej avsedd för trä, tyg, naturgummi, målade eller pappklädda ytor samt silikon.

**Förvaring**

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppen flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Utgångsdatum står tryckt på flaskan.

**Utseende och doft**

Klar vätska med karaktäristisk alkoholdoft

**Tillverkningsland**

SVERIGE

**Användar- och miljösäkerhet**

Allvarliga incidenter med KiiltoPro MD Instru Des IPA 45+ skall anmälas till [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com) samt till Läkemedelsverket som är den nationellt ansvariga myndigheten för medicinteknisk utrustning.

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
-----------------------------------	----------------	------------	------	------------

3 x 3 l		671-3	7331964006719	7331964906712
12 x 1000 ml		670-12	7331964006702	7331964906705

**Ytterligare information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).