



# Kiilto Pro Ytdesinfektion

## 75+

### Ytdesinfektion



Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+ är baserad på 75 vol% denaturerad etanol samt tensid (smutslösare) och avsedd för desinfektion av släta ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. Den är effektiv mot bakterier, jästsvamp och olika typer av virus som coronavirus, HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus. Produkten verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal effekt) 5 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek, (fungicidal effekt) 15 min

EN13697 (jästicidal effekt) 60 sek

EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) - 2 min

EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

EN14348 (mykobactericidal effekt) 60 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

<b>Användningsområde</b>	Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller djursjukvården.	
<b>Produktegenskaper</b>	75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan Innehåller tensid, vilket gör att ytan inte behöver förbehandlas Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och flera olika virus som t.ex. Corona, HIV, Murine Norovirus och Adenovirus.	
<b>Bruksanvisning</b>	Används på ytor som tål alkohol.  Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+ innehåller tensid vilket gör att ytan inte behöver rengöras först. Är ytan väldigt smutsig eller har mycket intorkat blod rekommenderas dock rengöring med vanligt rengöringsmedel först.  Gör så här: 1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska. 2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se produktblad för kontakttider) 3. Lämna ytan att lufttorka	
<b>Sammansättning</b>	<b>Aktiva ämen</b>	<b>Effekt</b>
	Etanol	75vol% med tensid

**Förvaring**

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppnad flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Utgångsdatum står tryckt på flaskan.

**Tillverkningsland**

SVERIGE

**Förpackningsvolym /  
Artikelnr.**

Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
12 x 1 l	495-12	7331964004951	7331964904954
1 x 10 l	497-1	7331964004975	
24 x 300 ml	494-24	7331964004944	7331964904947

**Ytterligare  
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).