

# plum Plum Ögonskölj

## Ögonskölj



Plum Ögonskölj innehåller 0,9 % steril natriumklorid motsvarande det naturliga saltinnehåll som ögat själv producerar. Den isotoniska lösningen är speciellt lämplig till att skölja och rensa ögat vid snabb förstahjälp där t ex damm eller smuts kommit in i ögat. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp som säkrar att vätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lätt på flaskan utan att klämma. Plum DUO flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör att du kan skölja båda ögonen samtidigt. Ögonsköljflaskorna är CE-märkta med hänsyn till gällande regler för medicinsk utrustning.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Användningsområde</b> | <p>Plum Ögonskölj används för att skölja bort främmande partiklar i ögat, t ex damm, smuts, metall- och träspån samt kemikalier som t ex olja och lösningsmedel. En sköljning kan förebygga att dessa partiklar och kemikalier orsakar allvarliga skador på ögat.</p> <p>Vid skador med syror och baser rekommenderar vi vår sterila pH Neutral, som är en 4,9 % fosfatbuffer som snabbt och effektivt neutraliserar mycket starka syror och baser. Efter användning av pH Neutral rekommenderar vi fortsatt sköljning fram till läkarbesök med Plum Ögonskölj 0,9 % natriumklorid. Notering: Sök läkare vid alla ögonskador!</p> |
| <b>Produktegenskaper</b> | <p>Rekommenderad sköljtid:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>200 ml: 2 min</li><li>500 ml: 5 min</li><li>1000 ml: 10 min</li><li>3 x 500 ml: 15 min</li></ul>   |
| <b>Bruksanvisning</b>    | <p>Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utgångsdatum (se etikett). Använd inte produkten om flaskans försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns det risk för infektion vid användning! Förvaras i 5-35 grader.</p> <p>Rekommenderad sköljtid:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>200 ml: 2 min</li><li>500 ml: 5 min</li><li>1000 ml: 10 min</li><li>3 x 500 ml: 15 min</li></ul>   |
| <b>Tillverkningsland</b> | DANMARK   |

Förpackningsvolym / Transport krt.  
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

|             |      |               |               |
|-------------|------|---------------|---------------|
| 6 x 1 l     | 4707 | 5701684470725 | 5701684470718 |
| 10 x 200 ml | 4691 | 5715205469129 | 5715205469112 |
| 12 x 500 ml | 4604 | 5701684460429 | 5701684460412 |



#### Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).