

# plum

## Plum pH Neutral

### Ögonskölj



pH Neutral är en 2 minuters ögonsköljningslösning för olyckor med syror och baser. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp, som säkerställer att ögonsköljvätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lätt på flaskan utan att klämma. Plum DUO flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör att du kan skölja båda ögonen samtidigt. Ögonsköljningsflaskorna är CE-märkta med hänsyn till gällande regler för medicinsk utrustning.

<b>Användningsområde</b>	Vid olycka med syror eller baser gäller det att så snabbt som möjligt neutralisera kemikalien till ett pH-värde omkring 7,4 svarande till ögats normala pH-nivå. Vid användning av vanligt vatten eller 0,9 % natriumklorid uppnår du endast en utspädnings- och sköljefekt. Efter användning av pH Neutral rekommenderar vi fortsatt sköljning fram till läkarbesök med Plum Ögonskölj 0,9 % natriumklorid. Notering: Sök läkare vid alla ögonskador!
<b>Produktegenskaper</b>	Hög funktionssäkerhet - flaskorna är framställda enligt EN 15154-4 Flexibla systemlösningar - små och stora stationer för väggmontering direkt vid arbetsplatsen. Eller mobila lösningar för att ha med sig i varubilen, i verktygs- och första hjälpenväskan eller direkt i bältesväskan Brett användningsområde (t ex industri, laboratorier, första hjälpenväskor, mobil användning etc) Enkel och snabb användning - kan användas av den olycksdrabbade personen utan assistans Lång hållbarhet - öppnad är den sterila vätskan hållbar i 3 år Kräver inget underhåll eller byte av vätska (som vid vanligt vatten)
<b>Bruksanvisning</b>	Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utgångsdatum (se etikett). Använd inte produkten om flaskans försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns det risk för infektion vid användning! Förvaras i 5-35 grader.  Rekommenderad sköljtid: 200 ml: 2 min 500 ml DUO: 2,5 min Efter sköljning med pH Neutral rekommenderar vi sköljning med Plum Ögondusch.
<b>Tillverkningsland</b>	DANMARK

Förpackningsvolym / Transport krt.  
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

10 x 200 ml

4752

5715205475229

6 x 500 ml

4801

5715205480129

5715205480112



Ytterligare  
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).