

TECMAN+
ADVANCED HEALTHCARE PRODUCTS



ANSIKTSSKYDD D

Produktkod: TEC-FACEVISOR _2

Ansiktsskydd för engångsbruk med mjuk elastisk str

Lättviks ansiktsskydd

Tecmans lätta ansiktsskydd med antifog-egenskaper skyddar ansiktet och ögonen från stänk eller sprutning av smittsamma eller farliga ämnen. Engångsansiktsskydden är tillverkade av optiskt klar polyester för maximal synlighet, medan det mjuka elastiska bandet och huvudbandet av PU-skum ger extra långvarig komfort och hållbarhet.

Produkten kan bäras med eller utan ytterligare ansiktsskydd, t.ex. receptbelagda eller skyddande glasögon och ansiktsmasker.

Vår ansiktsskydd med registrerad design tillverkas med hjälp av en patentskyddad process.



Viktiga funktioner

- + Antifog-egenskaper*
- + Optiskt klart visir för maximal synlighet
- + Huvudband av PU-skum för långvarig komfort
- + Mjukt elastiskt band
- + Lättviktsdesign
- + Skyddar ansiktet och ögonen mot stänk eller sprutning.
- + Kan bäras med eller utan glasögonskydd och ansiktsmask
- + EN 166:2001 kategori II certifierad (EU) 2016/425

Gemenskapsdesign nr 008192637

Specifikationer

Spec	Detaljer
PRODUKT FÄRG	OPTISKT KLAR (INGEN FÄRG)
PRODUKT TYP	ANSIKTSSKYDD
STORLEK	330MM X 220MM
OPTICAL CLASS	1 (+/-0.06)
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	DROPPAR ELLER STÅNK AV VÄTSKOR
ANSÖKAN	HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, PPE (EJ FÖR INDUSTRIELLT BRUK)
STANDARDER	EN166:2001 KATEGORI II cl 6.1-6.3, 7.1.1, 7.1.2.1-7.1.2.3, 7.1.3, 7.1.5.1, 7.1.7 & 7.2.4
HYLLANS LIVSLÄNGD	5 ÅR UNDER REKOMMENDERADE FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN
FÖRVARINGSFÖRHÅLLAN DEN.	FÖRVARA I ORIGINALFÖRPACKNINGEN UTANFÖR DIREKT SOLLJUS VID 23°C OCH 50 % RH.

MATERIALDATA

Material	Beskrivning	Storlek
VISOR FILM	OPTISK KVALITET PET	0,16 - 0,18 MM TJOCK
SKUMGUMMI HUVUDBAND	MJUK KVALITET PU	25 MM TJOCKLEK
ELASTISK STRAP	MEDICINSK KVALITET, LATEXFRI	19MM BREDD

Instruktioner för användning

Ta försiktigt bort skyddsfilm från visirets baksida innan du använder det. För att sätta på och ta av produkterna måste du se till att elastiken är ordentligt lindad runt huvudet med skummet mot pannan. Bär endast produkter av lämplig storlek som är korrekt justerade. Produkter som sitter löst kan inte sitta på plats och om de sitter för hårt å kommer de att vara obekväma. Storleken på denna produkt finns i en standardstorlek med ett elastiskt huvudband.

Ytterligare specifikationer

Latexfri / Material av medicinsk kvalitet / Engångsanvändning, rengöring rekommenderas inte / Kan användas under längre perioder eftersom den inte skapar förvrängning eller trötthet / Visiret är lämpligt för användning med receptbelagda linser och kirurgiska masker / Kontrollera alltid före användning / Tillverkad i Storbritannien

*Inte i enlighet med EN166: 2001 7.3.2 Motståndskraft mot dimma

DOC252, NUMMER 5, JULI

22

