



Liv Des +45

Produktinformation

Ytdesinfektion som innehåller 45 vol% isopropylalkohol med en tillsats av tensid för att få en rengörande effekt. Produkten kan användas inom områden där mikrobiologisk smittspridning skall förebyggas och förhindras. Avsedd för ytor kontaminerade med kroppsvätskor, blod osv. Fri från Castor Oil. Produkten är godkänd för desinficering av Siemens Acuson ultraljudsgivare.

Bruksanvisning

Används outspädd. Spruta ut rikligt med desinfektionsmedel på ytan (om stor) som skall desinficeras och stryk noggrant ut och bearbeta därefter ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper. Vid mindre ytor applicera på torkduken eller det luddfria pappret. Det är viktigt att ytan är fuktig under hela verkningstiden, minimum 1 min. Generell verkningstid: 1-5min. Ytan ska lufttorka. Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.

Produktdata

Artikelnummer	Benämning	Antal/kartong	EAN
17049300	Liv Des +45 300 ml	24 * 300ml	7391443170409
17040001	Liv Des +45 1 L	12 * 1L	7391443170430
17040005	Liv Des +45 5 L	2 * 5L	7391443170454
UNSPSC:	42281604		





Mikrobiologisk effekt:

Bactericidal EN13727:	1min
Bactericidal EN13697:	1min
Bactericidal EN16615:	5min
Yeasticidal EN13624:	1min
Yeasticida EN16615:	5min
Mycobactericidal EN14348:	5min
Virucidal EN14476:	
Höljeförsedda virus:	30sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Hantering

3 års hållbarhet i öppnad förpackning. 12 månader efter öppnande. Tomma emballage ska sorteras som "förpackning av plast". Ej helt tomma emballage ska sorteras som "farligt avfall".

