



# KiiltoPro MD Des Etanol

## 75

Ytdesinfektion



KiiltoPro MD Des Etanol 75 är en medicinteknisk produkt som består av ca 75 vol% denaturerad etanol och är avsedd för desinfektion av hårda, synligt rena ytor och non-invasiv medicinteknisk utrustning inom hälso- och sjukvården och tandvården som t.ex. patientsängar, undersökningsbriter etc. Även klassificerad som biocid PT2 och kan användas på generella ytor som tål alkohol.

Produkten är effektiv mot bakterier, jästsvamp och höljeförsedda virus som t.ex. HIV, Hepatit B och C, Coronavirus samt vissa nakna virus som Adenovirus, Rotavirus och Murine Norovirus. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna torkränder på den behandlade ytan.

<b>Användningsområde</b>	<p>Bruksfärdig etanolbaserad desinfektion för synligt rena ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol.</p> <p>Medicinteknisk produkt, för professionell användning.</p>
<b>Produktegenskaper</b>	<p>CE-märkt medicinteknisk produkt (MDR 2017/745), klass IIa, NB 0537.</p> <p>Mikrobiologisk information: EN13727 (baktericidal effekt) - 30 sek EN13624 (jästicidal effekt/fungicidal effekt) - 30 sek/15 min EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) - 2 min EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) - 30 sek EN14348 (mycobaktericidal effekt) - 1 min</p> <p>Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.</p>
<b>Bruksanvisning</b>	<p>Används på synligt rena ytor som tål alkohol. Om du är osäker på om ytan tål alkohol, prova först på ett undanskymt ställe.</p> <p>Gör så här:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel.</li><li>2. Spruta rikligt med produkten på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska.</li><li>3. Bearbeta ytan upprepade gånger så den är fuktig under hela kontakttiden (se etiketten för kontakttider)</li><li>4. Lämna ytan att lufttorka</li></ol>
<b>Obs</b>	<p>Ej avsedd för trä, tyg, naturgummi, målade eller pappklädda ytor samt silikon.</p>

**Förvaring** Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppen flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Utgångsdatum står tryckt på flaskan.

**Utseende och doft** Klar vätska med karaktäristisk alkoholdoft

**Tillverkningsland** SVERIGE

**Användar- och miljösäkerhet** Allvarliga incidenter med KiiltoPro MD Des Etanol 75 skall anmälas till [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com) samt till Läkemedelsverket som är den nationellt ansvariga myndigheten för medicinteknisk utrustning.

PT2 biocidprodukt för professionell användning.  
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen för användning.

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
	12 x 1000 ml	693-12	7331964006931	7331964906934



**Ytterligare information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).