



DiverseyTM

Suma Med Enzyme

För anestesi-, operations- och dentalutrustningsrengöring

Produktbeskrivning

Suma Med Enzyme är ett mildt enzymbaserat maskindiskmedel speciellt formulerat för känsligt operationsgods. Suma Med Enzyme löser effektivt smuts på operationsgods i mjuka och medelhårda vatten.

Produktegenskaper

Suma Med Enzyme är ett mildt enzymbaserat maskindiskmedel som passar alla typer av disk. Produkten löser effektivt smuts på operationsgods, anestesi- och endoskoputrustning. Produkten innehåller enzymet Protolas vilket effektivt löser smuts och beläggningar i mjuka och medelhårda vatten.

Produktfördelar

- Löser effektivt smuts och intorkat blod
- Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
- Enzymer ger extra skonsam rengöring av pH-känsliga material

Dosering*

Suma Med Enzyme doseras normalt med automatisk doseringsutrustning 2 - 6 ml/l. Doseras vid 20-25 C. Koppla dunken till doseringsautomatiken / doseringsslangen som sedan automatiskt doserar rätt mängd.

Lokala förhållanden avgör den exakta doseringsmängden.

Produkten är avsedd att doseras samtidigt med vattenintag, men kan även doseras senare.


Produkten kan även doseras manuellt. Vid handdisk doseras 5-7 ml/lit vatten.

Vid manuell dosering ska skyddsglasögon och handskar användas (PVC, nitril, latex eller neoprene).

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



 Diversey Europe
Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands

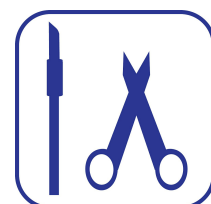



Suma Med Enzyme

Teknisk information

Utseende: Klar ljusgul vätska
pH koncentrat: ~ 7
pH brukslösning: ~ 7 (0.6 %)
Relativ densitet (g/cm³; 20°C): ≈ 1.13 (20 °C)

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och avfallshantering av denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com. Hantera enligt god industriell hygien och säkerhetspraxis. Hålls borta från mat, dryck och djurfoder. Blanda inte med andra produkter om inte Diversey ger råd om detta. Förvaras i slutna originalförpackningar och ska hållas borta från extrema temperaturförhållanden. Produkten är inte avsedd att återanvändas. Endast för professionella användare/specialister.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
7511762	Suma Med Enzyme 2x5L W3605 X	Automatisk dos
7512082	Suma Med Enzyme 200L W1779 X	Automatisk dos
101107766	Suma Med Enzyme 2x5L W3605	Automatisk dos
101107767	Suma Med Enzyme 200L W1779	Automatisk dos

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 13/12/2023 sv-SE (P01150)