

Op-mössa basker



Ingående material

100% Polypropylen (PP) nonwoven

Vikt

14g/m²

Färg

Blå

Resår:

Elastan (Polyester-polyuretan)

Produkten innehåller inte PVC.

Storlek:

50 (S), 55 (M), 60 (L) cm i diameter

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP

Transportförpackning TFP

Material

kartong

kartong

Avfallshantering*

kartong

kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl	Ø cm	St/AFP	St/TFP	MBA
3110	S	50	100	10 x 100 = 1000	TFP
3120	M	55	100	10 x 100 = 1000	TFP
3130	L	60	100	10 x 100 = 1000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Baskermössa avsedd för att innesluta bärarens hår. Produkten kan användas under operation eller vid annat vårdrelaterat procedur där det finns behov av att förhindra lösa hårstrån på önskad plats.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av både personal och patient.

1. Öppna innerförpackningen genom att trycka in perforeringen på förpackningens ovansida.
2. Använd rena händer/handskar för att plocka ut innehållet. Mössan ligger vikt i förpackningen.
3. Påtagning sker genom öppna mössan.
4. Trä därefter mössan över huvudet och se till att allt hår stoppas in.
5. Vid avtagning är det enklast att ta tag i mössan främre kant och dra den bakåt.

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. (EU) MDR 2017/745 klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo-medical Co., Ltd
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza
No.409 Jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo 315021, China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Caretechion GmbH.
Niederrheinstr. 71
40474 Dusseldorf
Germany